



Lathund till META TAN[◇] Femur/standard läge

OBS: Se operationsmanual för en utförlig operationsteknik

Steg 1 – Markera ingången med en 3,2mm Guide pin.

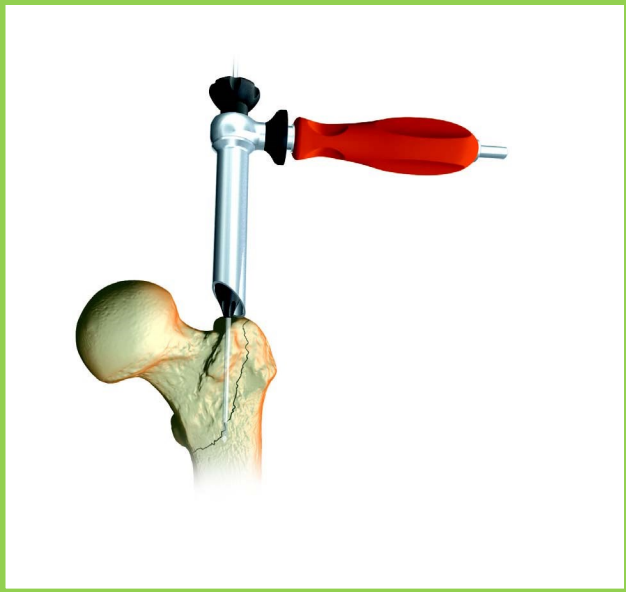

Steg 2 – Öppna upp mörkanalen med ingångsreamer.

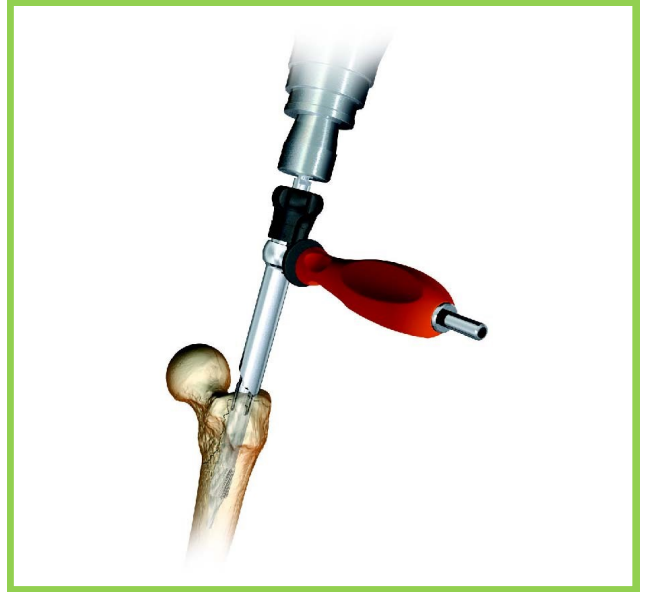

Steg 3 – Montera ihop spik och spikguide och för ner spiken.



Steg 4 – Kontrollera läget i Genomlysning.



Steg 5 – Montera ytterhylsan och borrhylsan i det anteriora hålet.




Steg 6 – Borra genom bägge cortex. Mät av längden mot innerhylsan.





Steg 7- Skruva in vald skruv.



Steg 7 – Distal låsning med frihands teknik.

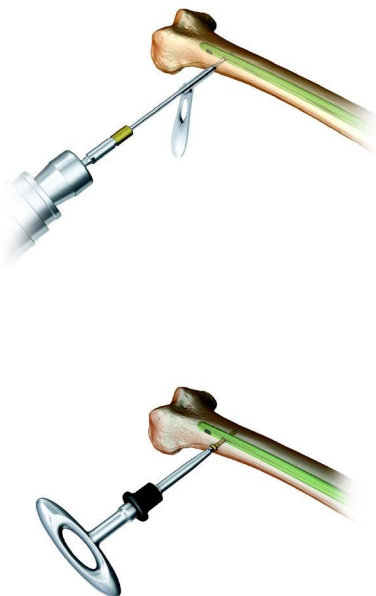

Implantat specifikationer

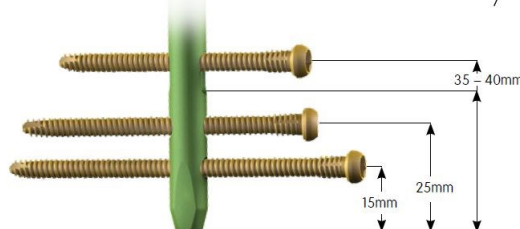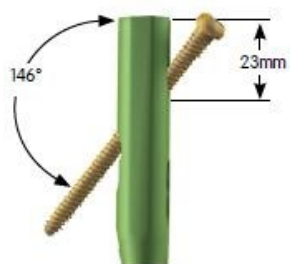

Smith & Nephew AB

Kråketorpsgatan 20
431 22 MÖLNDAL
SVERIGE

Telefon: 031-746 58 00

Mail: order@smith-nephew.com

Varumärke ifrån Smith & Nephew. Reg. US Pat. & TM
Alla rättigheter reserverade.