




Operationsteknik META-TAN[◇] Femurläge

Detta är en förenklad operationsbeskrivning för utförligare beskrivning se broschyr: 01716 V2 META-TAN 1015


Trochanteringång

Optimal ingång är på toppen av trochantern, i linje med den anatomiska axeln i A/P och center/center i den laterala axeln.

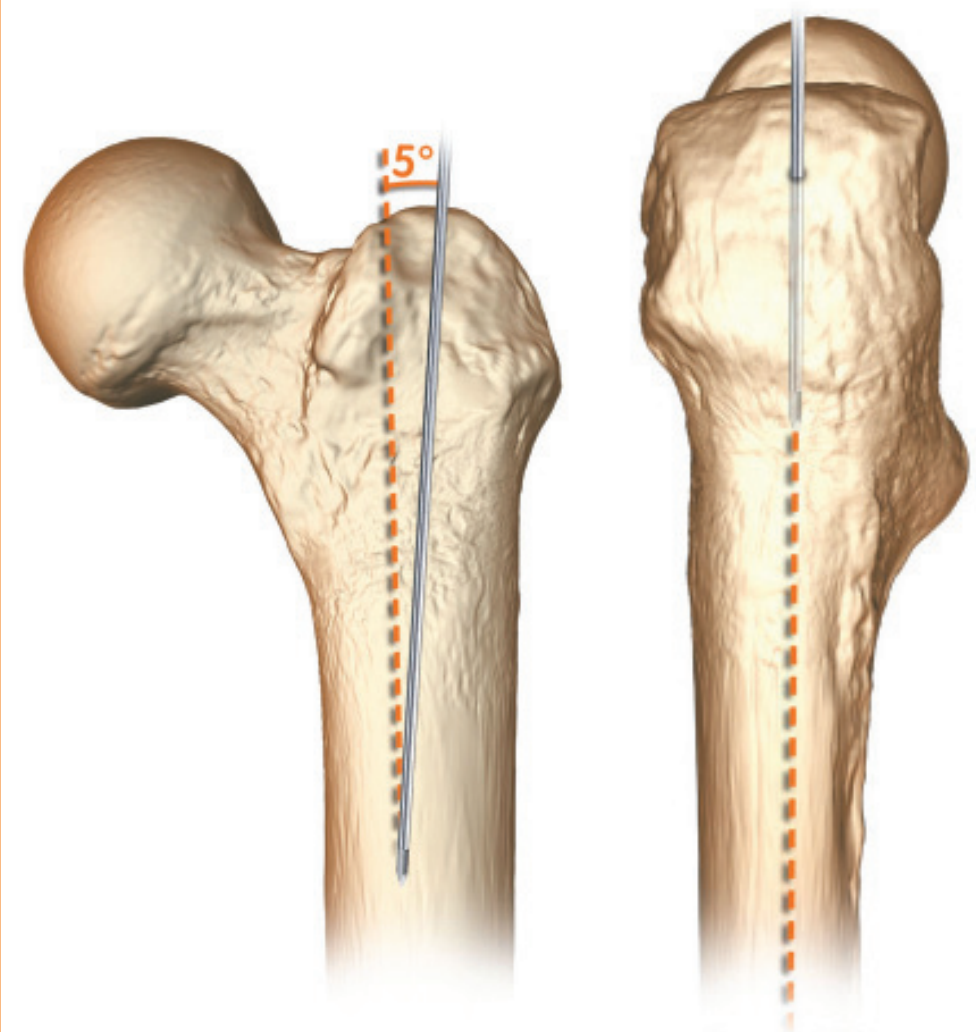

Steg 1

Borra ner en 3,2mm guidepin ca 2-3cm i trochantern, justera ev läget med en andra guidepin. Öppna upp den proximala delen av trochantern med ingångs reamern. Ta bort inner-reamer, låt ytter-reamern sitta kvar.

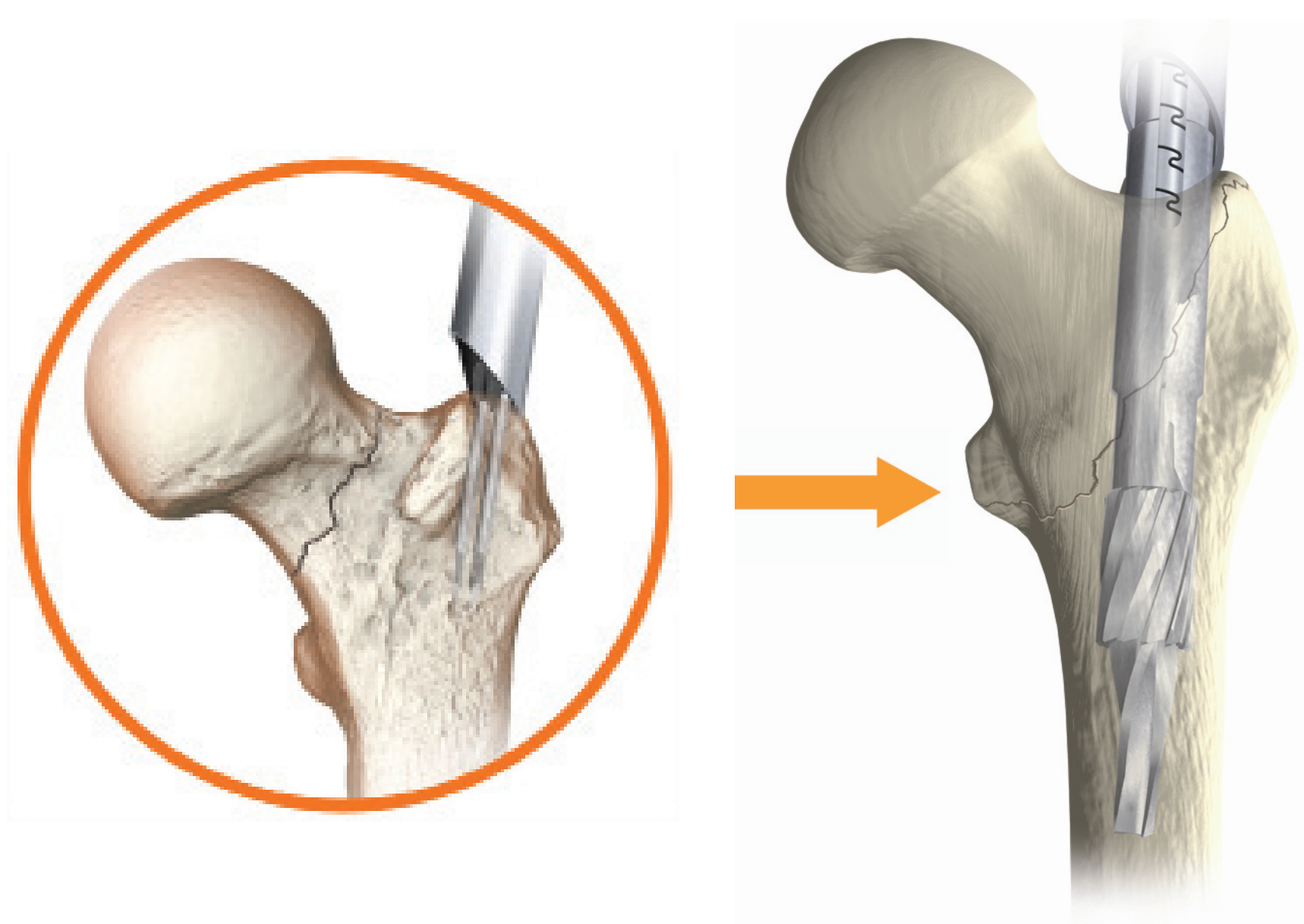

Steg 2

Reponera frakturen. För ner långa ledaren. Märgborra vid behov. Mät spiklängden. Kontrollera läget på ledaren distalt.




Steg 3

För ner spiken för hand så lång det är möjligt. Ev, kan ett par lätta slag med hammaren behövas den sista biten. Kontrollera läget på spiken distalt.



Steg 4

För ner spiken till kortax eller strax under. Roterar guiden tills rätt läge uppnås i lateralplanet. Rätt läge har man när spikguiden är centralt placerad i collum/caput.

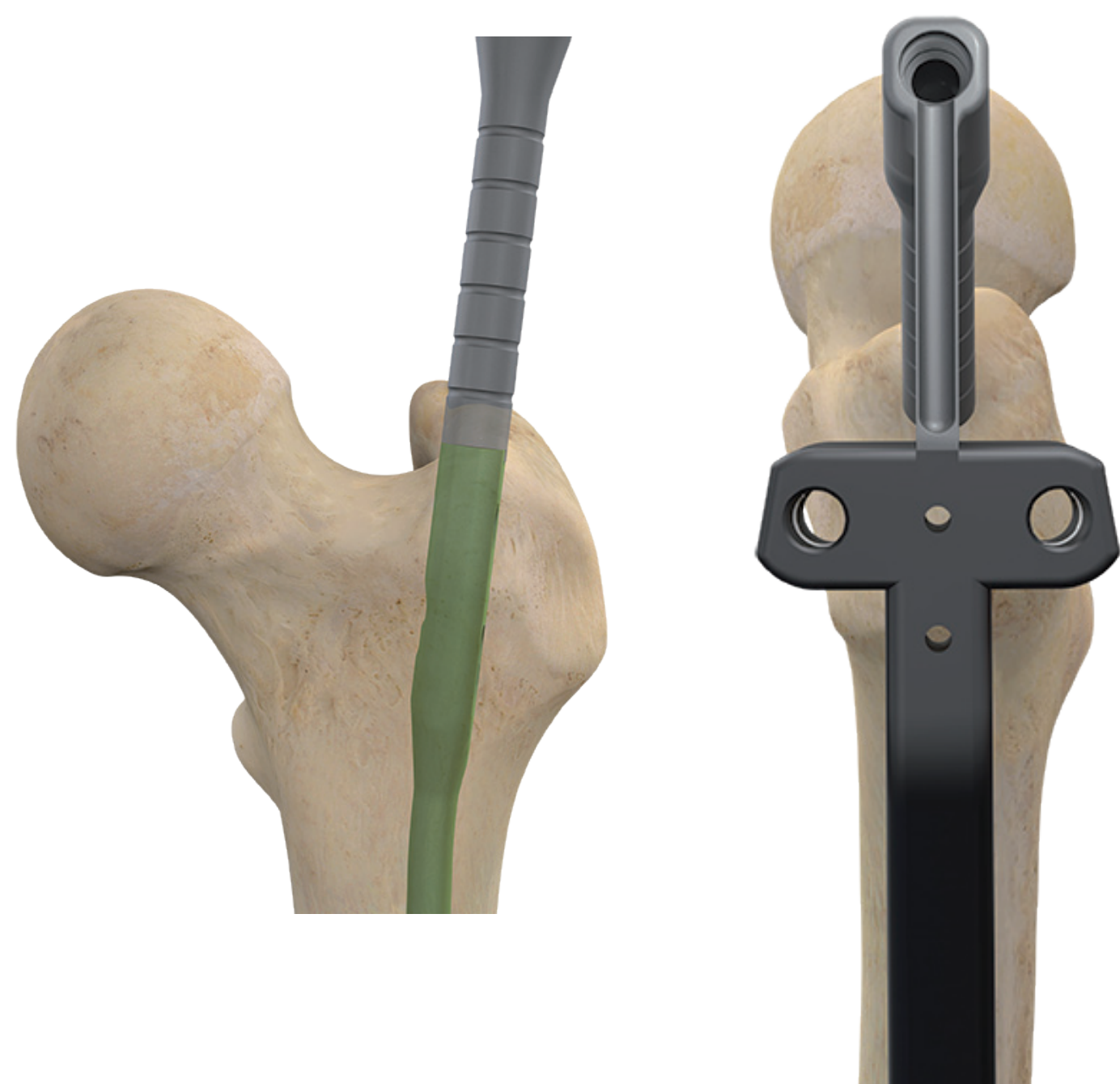


Proximal låsning Femurläge

Placera borr och skruvhylsorna i det anteriöra hålet på guiden, tryck hylsorna mot kortax. Borra och mät skruvlängden mot borrhylsan eller med mätstickan. Implantera skruven.



Distal låsning

Distal låsning enligt frihandsteknik. Borra med kort 4,0mm borr, mät skruvlängden med mätstickan. Skruva i valda skruvar.

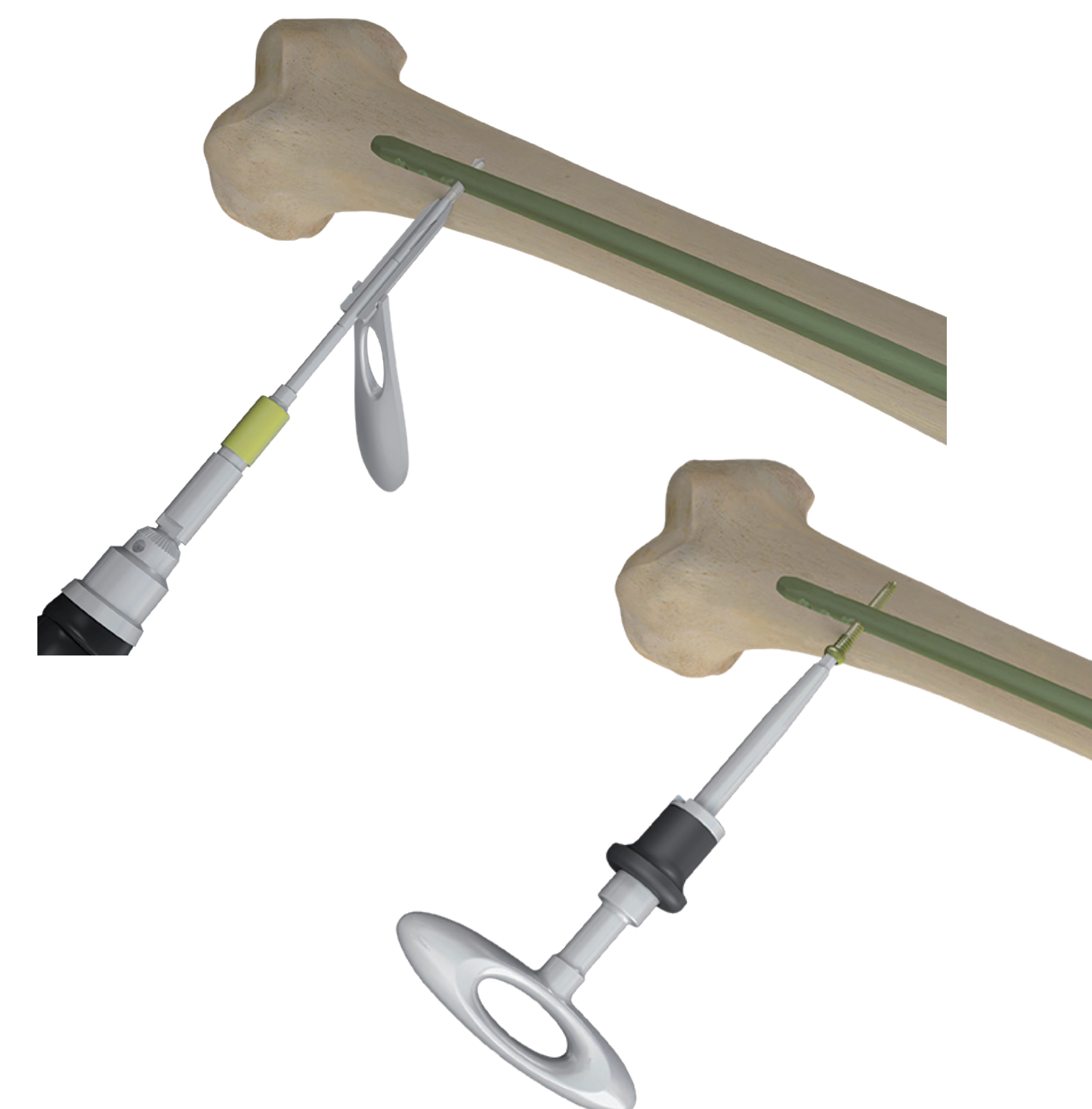

Implantat

