

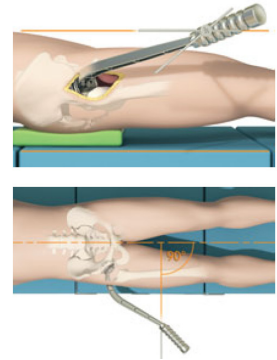


Denna kortfattade operations beskrivning avser användandet av cementerad POLAR cup.

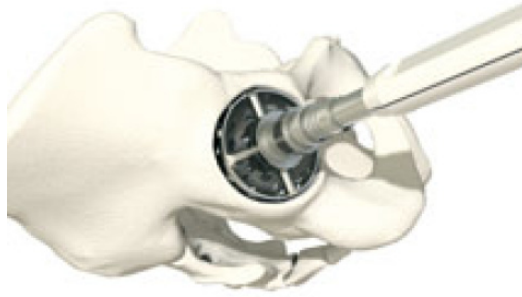

Preparera acetabelum genom att fräsa till önskad storlek, välj därefter en POLAR cup som är 4 mm mindre än sista acetabelum fräsen. Dvs. om sista acetabelum fräsen är 59 mm diameter, välj då en 55 mm diameter cementerad POLAR cup. Detta ger en 2 mm cementmantel runt om cupen. Position kontrolleras med prov cup.

When using a POLARCUP® version with anchoring pegs and flanges, the two marks on the trial shell indicate the position of the flange on the final implant.

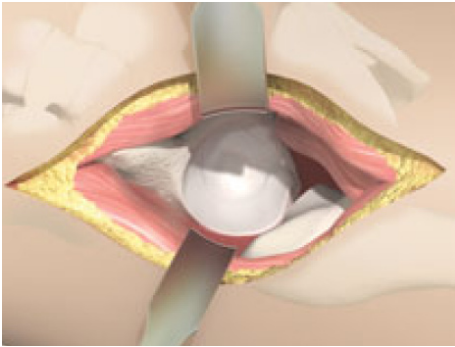

Prov cup med prov liner. Montera provcup och liner, prova med provhuvud på femurprotes.

Definitiv protes.

Montera vald POLAR cup i cup hållaren. Implantera cupen i acetabelum.



Ett 28 mm diam. huvud pressas ner i PE liner med hjälp av pressverktyget.



Liner med monterat 28mm diam. huvud monteras på femur prote-sen.



Avslutningsvis reponeras caput på plats i acetabelum

**Cementerad Polar Cup med tillhörande liner finns i storlekarna 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63mm diam.**

