



Lathund till INTERTAN[◇] med kompressions skruv

OBS: Se operationsmanual för INTERTAN Gold för en mer utförlig operationsteknik

Steg 1 – Markera ingången med en 3,2mm Guide pin

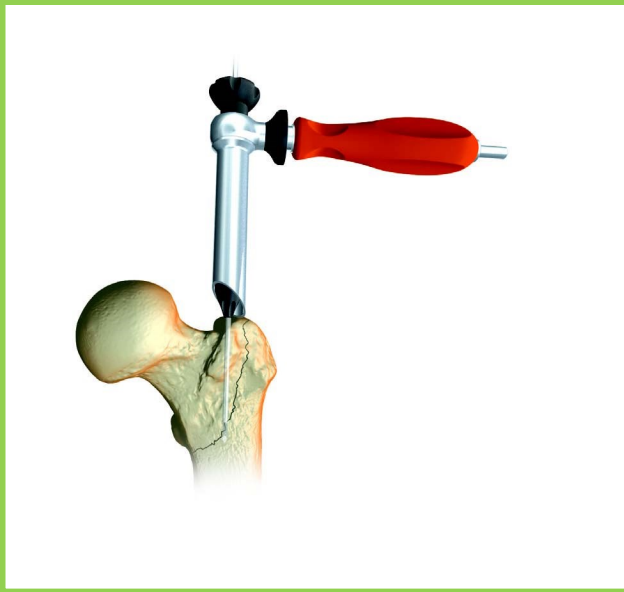


Steg 2 – Öppna upp mörghkanalen med ingångsreamer

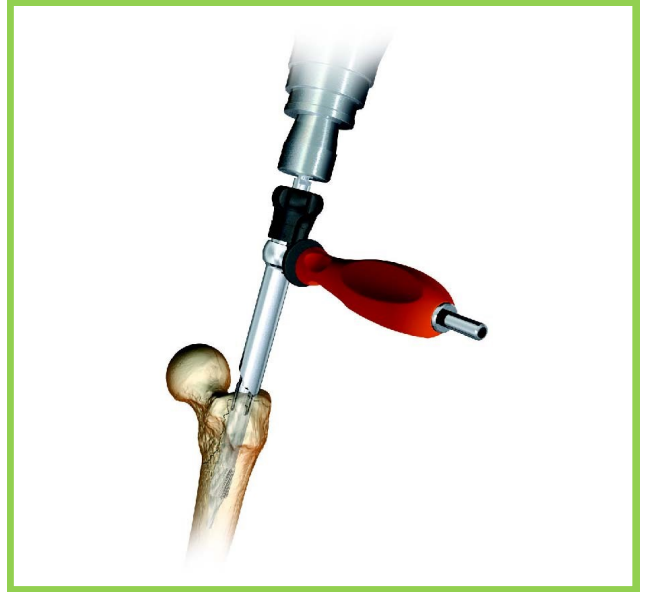


Steg 3 – Montera ihop spik med spikguide och för ner spiken



Steg 4 – Kontrollera läget i genomlysning

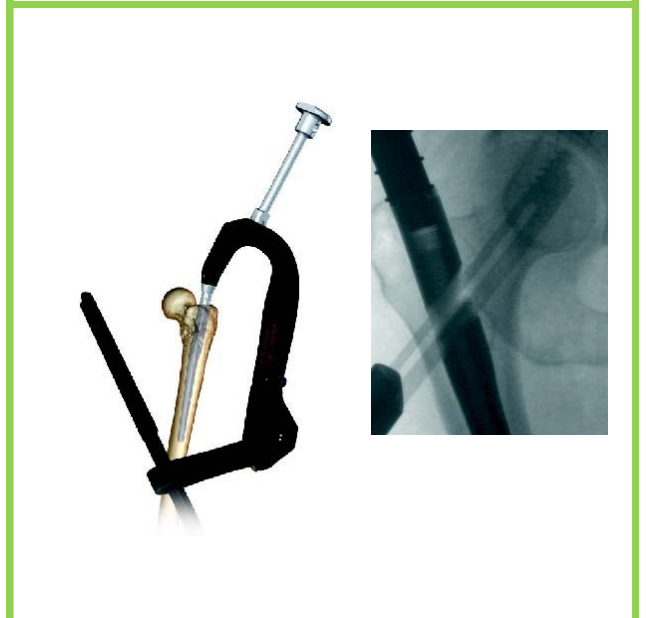

Steg 5 – Montera borrhylsan för lag skruv och 3,2mm guide pin hylsa. För in en 3,2mm guide pin till önskat läge.

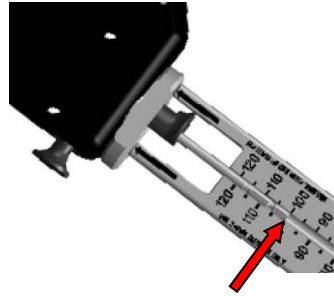

Läs av längden för lag skruven mot bakre delen av guide pin.


OBS: Om kompression önskas dra av önskad längd från mätningen av lag skruven.

Tex: Uppmätt längd 100mm, önskad kompression 5mm = 95mm lag/kompressions skruv

Steg 6- Borra för kompressions skruven och för in anti rotations pinnen



Steg 7 – Borra för lag skruven

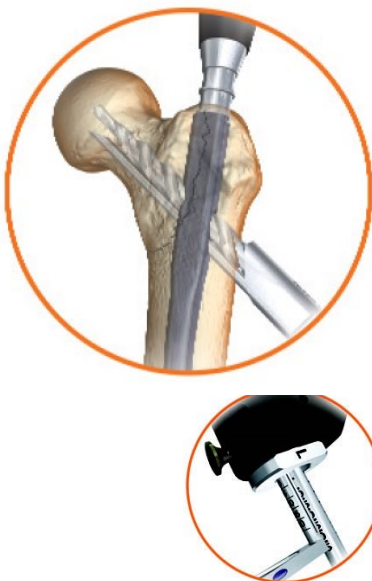

Steg 8 – Skruva in lag skruven



Steg 9 – Skruva in kompressions skruven.



Följ stegen på nästa sida om kompression av frakturspalt önskas

Kompression av frakturspalt - Önskas kompression av frakturspalt



Läge för 5mm kompression.




Läge för 10mm kompression.




Läge efter kompression.

Steg 10 – Kort spik: Distal låsning genom spikguide

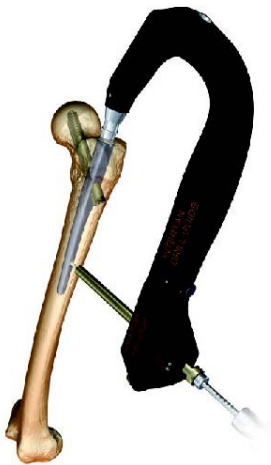

OBS: INTERTAN spikarna kommer med en för monterad setskruv. Den kan dras åt för att förhindra "sliding" ELLER dras åt och lossas $\frac{1}{4}$ varv för att tillåta "sliding".

Steg 11 – Lång spik: Distal låsning med frihandsteknik

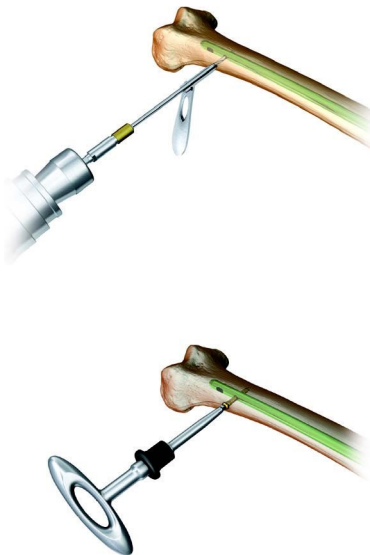

Resultat



Smith & Nephew AB

Kråketorpsgatan 20
431 22 MÖLNDAL
SVERIGE

Telefon: 031-746 58 00

Mail: order@smith-nephew.com

^Varumärke ifrån Smith & Nephew. Reg. US Pat. & TM
Alla rättigheter reserverade.